



Активный захват

12405/26, 12444



Руководство по эксплуатации

www.sims2.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	3
2.1 Важные предупреждения.....	3
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик активного захвата 12405/26 и 12444.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Активный захват 12405/26 и 12444 предназначен для людей с ограниченными двигательными функциями. Позволяет, не вставая с места, перемещать небольшие предметы.

1.2 Технические характеристики

	12405/26	12444
цвет	пластмассовые детали выполнены в сером цвете; прорезиненные - в желтом	черный и красный
материал	алюминий, пластмасса, резина	алюминий, пластмасса
длина (см)	66	84
ширина (см)	14	10
глубина (см)	6	6
вес изделия (кг)	0,2	0,2

1.3 Упаковка

Комплектация: активный захват, полиэтиленовая упаковка, руководство по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Перед началом эксплуатации, проверьте все части изделия на наличие трещин.

- Не пытайтесь поднимать тяжелые предметы с помощью активного захвата. Это может привести к повреждению рук или запястий.

2.2 Порядок работы:

1. Вытащите изделие из упаковки.
2. Нажмите на курок, когда держатели будут находиться вокруг предмета, который необходимо поднять. Нижний держатель захвата оснащен магнитом для поднятия легких металлических предметов. Нижний держатель захвата 12405/26 оснащен магнитом для поднятия легких металлических предметов.

3. Техническое обслуживание

Уход за изделием следует проводить водой и не абразивными истирающими средствами. Затем тщательно высушить.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Активный захват 12405/26 и 12444

Производитель: Valentine International Ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел.: (495) 792-31-90; (800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Номер артикула	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru